

## Manuel et instructions pour le Soutien Lombaire Gonflable

Le support lombaire est composé d'un coussin gonflable, d'une sangle élastique, d'une poire de gonflage et d'une soupape d'évacuation.



Pour installer le support lombaire, il faut placer la partie avec le coussin sur le dos du siège et le régler à l'aide de la sangle en velcro.

Après son installation, il faut se munir de la poire de gonflage, vérifier que la soupape d'évacuation est fermée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut exercer une pression sur la poire de gonflage jusqu'à ce que le coussin se gonfle au niveau souhaité par l'utilisateur.

Pour dégonfler le coussin il faut prendre la soupape d'évacuation et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.